



rolyan[®]

for Hand Therapy.



Ezeform[™]

GRUPO
COMERCIAL
Orthos
queremos ayudarte


Material de ferulización termoplástica Rolyan Ezeform

Visión de conjunto

Ezeform™ presenta una alta resistencia al estiramiento y una adaptabilidad moderada, lo que hace que permanezca en su lugar mientras se moldea, lo que brinda al médico más control. No perderá su forma cuando se retire de un baño de férulas, por lo que es una opción excelente para férulas medianas y grandes. Ezeform no tiene una capa protectora y se adhiere a sí mismo instantáneamente sin preparación de la superficie. Se puede recalentar y remodelar repetidamente, pero una vez que se ha estirado, no volverá a su forma original.

Espectro Rolyan de material para entablillado

Rolyan ofrece a los terapeutas y médicos la gama más amplia de productos y cuidados para la terapia de las manos. Rolyan empodera a cada terapeuta con la pasión de moldear y dar forma a la recuperación de sus pacientes.

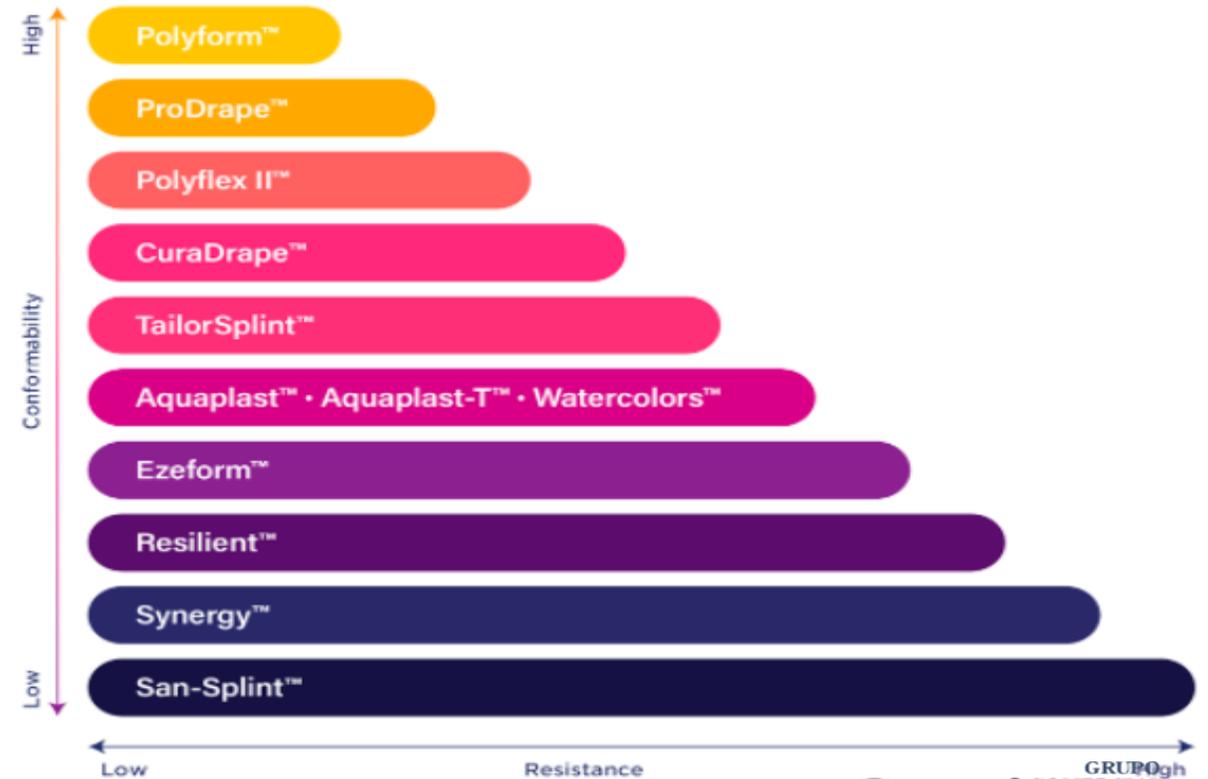



Ezeform™

Instrucciones de calentamiento

El método recomendado para calentar materiales para férulas es con agua caliente en un baño de férulas.

Utilice únicamente una pistola de aire caliente para el calentamiento puntual y los ajustes.

Espesor de materiales	Tiempo aproximado de calentamiento	Temperatura del agua: Fahrenheit Celsius	tiempo de trabajo
1/8" (3,2 mm)	1 minuto	160° a 170° 70° a 75°	4 a 6 minutos
1/16" (1,6 mm)	35 seg	150° a 160° 65° a 70°	1 minuto
3/32" (2,4 mm)	30 - 45 seg	150° a 160° 65° a 70°	2 a 3 minutos

Nota: el sobrecalentamiento de los materiales de ferulización aumenta las características de drapeado/estiramiento; Deje que el material se enfríe un poco antes de manipularlo para evitar que se estire demasiado.

Indicaciones

Los materiales de ferulización están destinados a ser utilizados para la fabricación de férulas rígidas moldeadas a la medida, ortesis y equipo de adaptación.

Los mejores usos incluyen:

- férulas de rodilla
- férulas de hombro
- férulas de mano
- férulas de muñeca
- férulas de codo
- Férulas dinámicas
- Férulas pediátricas
- férulas caída del pie
- Férulas para la espasticidad
- Férulas del túnel carpiano
- Soportes traseros
- Quemar férulas
- Férulas estáticas progresivas y estáticas seriadas





rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]



GRUPO
Orthos
queremos ayudarte



rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]



GRUPO
COMERCIAL
Orthos
queremos ayudarte



rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]





rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]





rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]





rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]



GRUPO
COMERCIAL
Orthos
queremos ayudarte



rolyan[®]

for Hand Therapy.

Ezeform[™]






rolyan[®]

for Hand Therapy.



Ezeform[™]

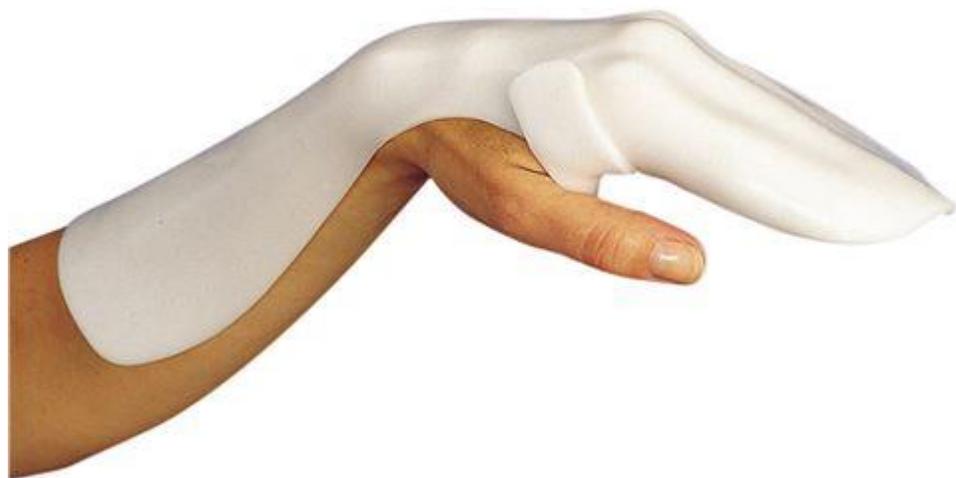



rolyan[®]

for Hand Therapy.

Para cualquier cotización o consulta que se requiera estamos a sus órdenes en:

MUNDO SENSORIAL, S.A. C.V.

Lic. Araceli Alejos

Tel. Ofna. 55 68359744

WhatsApp: 773 139 2924

Ezeform[™]

E mail: araceli.alejos@grupoorthos.com.mx

info@grupoorthos.com.mx

www.grupoorthos.com.mx